

NÁVOD K POUŽITÍ

Jednorázová zdravotnická obličejová maska

【Název výrobku】

Jednorázová zdravotnická obličejová maska

【Stručný popis】

Netkaná textilie Melt-blown umí filtrovat škodlivé látky ve vzduchu a účinně regulovat vzduch se škodlivými látkami, které mají být filtrovány přes filtrační vrstvu masky, než bude vzduch ústy uživatele vdechnut nebo vydechnut.

【Popis modelu】

70010001, 70011001

【Zamýšlené použití】


Je určena k zakrytí úst, nosu a čelisti uživatele, který vydechuje nebo vylučuje znečišťující látky z úst a nosu v obecném lékařském prostředí.

【Kontraindikace】

Používejte masku opatrně, pokud jste alergičtí na netkané textilie.

【Strukturální složení】

Jednorázová zdravotnická obličejová maska se skládá z vlastního těla obličejové masky a nosní spony. Tělo obličejové masky se skládá ze třech vrstev. Diagram struktury je následující:

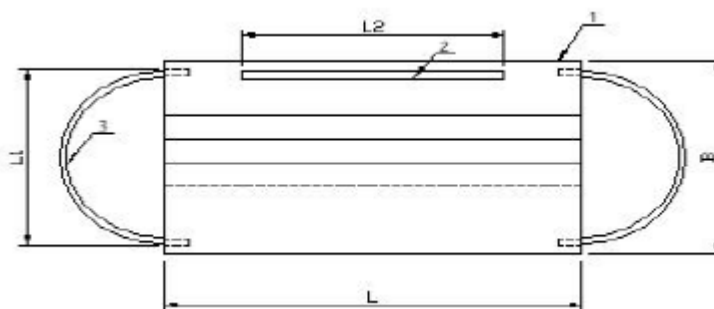

1: Tělo masky 2: Nosní spona 3: Pásek masky

Obr 1: Plochý typ s úchyty za uši

【Materiály】

Vnitřní a vnější vrstva jsou z polypropylenové netkané textilie Spunbond a prostřední vrstva je tvořena netkanou textilií Melt-blown, plastová nosní spona a elastický pásek.

**【Sterilizace】**

Produkt je nesterilní.

【Bezpečnostní opatření a varování】

- 1) Přečtěte si pozorně pokyny, abyste se nedotkli vnitřní vrstvy masky.
- 2) Tento produkt nebyl sterilizován, před použitím prosím zkontrolujte obal. Pokud je obal poškozen, je zakázáno produkt používat.
- 3) Tento produkt je jednorázový a nelze jej použít znovu.
- 4) V případě potřísnění produktu kapalinou, poškození, zdeformování a zjevného zvýšení respiračního odporu během nošení jej prosím včas vyměňte.
- 5) Po použití je nutno s produktem zacházet v souladu s požadavky nemocnice nebo oddělení ochrany životního prostředí.

【Návod k použití】

- 1) Otevřete obal, vyjměte masku, uchopte oba konce masky s nosní sponou směřující nahoru.
- 2) Masku zakrývá ústa, nos a dolní čelist, a pásek je umístěn za uchem.
- 3) Prsty upravte nosní sponu podle tvaru nosu.
- 4) Řádně upravte pozici masky, aby se pohodlně nosila.
- 5) Noste masku správně podle značek vpředu a vzadu. Nedotýkejte se rukama vnitřku masky.

【Požadavky na výkon】

Výkon masky je v souladu s normou EN 14683:2019+AC: 2019. BFE≥95%

【Seznam produktů】

č.	Název
1	Jednorázová zdravotnická obličejová maska
2	Návod

【Skladování a přeprava produktu】

- 1) Během přepravy musí být produkt chráněn před silným tlakem, přímým slunečním světlem, deštěm a sněhem.
- 2) Produkt skladujte ve větraném a suchém prostředí bez korozivních plynů. Chraňte před ohněm a hořlavými materiály.

【Datum expirace】

Produkt je použitelný 2 roky od data výroby. Produkt prosím použijte v rámci doby jeho použitelnosti.

【Definice symbolů】



	CE ZNAČENÍ		UPOZORNĚNÍ
	NEPOUŽÍVEJTE, JE-LI OBAL POŠKOZEN		NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ
	CHRAŇTE PŘED SLUNEČNÍM SVĚTLEM		UCHOVÁVEJTE V SUCHU
	KÓD ŠARŽE		SPOTŘEBUJTE DO
	DATUM VÝROBY		VIZ NÁVOD K POUŽITÍ
	VÝROBCE		ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE V EVROPSKÉM SPOLEČENSTVÍ
	Nesterilní		Zdravotnický prostředek

**Výrobce**

Název: Shanghai Oma Safety Products Co., Ltd.


Adresa: Room 506, No. 23, Lane 423, Xincun Road, Shanghai 200065, China

PSČ: 200065

Tel: +86 (21)-32092351

Fax: +86-21-32092350

E-mail: sales-1@oma-safety.cn

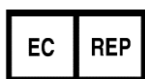**Zplnomocněný zástupce v Evropském společenství**

Název: CMC MEDICAL DEVICES & DRUGS S.L.

Adresa: C/ Horacio Lengo Nº 18, CP 29006, Málaga, Spain

E-mail: victoriali@cmcmedicaldevices.com

【Verze】 2020.05.10**【Č. revize】** A/0